



VAKUMLU KARISTIRICI KULANIM KLAVUZU



TEKNİK ÖZELİKLERİ

Ağırlık 12kg koli değişimi olabilir
Uzunluk/Genislik/yükseklik
Ana Güç Kaynağı:220volt 50/60HZ
Güç Tüketimi 300watt
Karıştırma Devri 350 Devir Dakika
Vakum 760/800 mbar hava basıncına göre
Hava vakum pompası 20 Litre dakika

AMBALAJ İÇERİĞİ

Duvara işaretleme plastik aparatı delikli
1 Adet filitre
3 Adet dübel 2Adet vida
Garanti kartı
Kullanma klavuzu
1Adet paslanmaz bıçaklı karıştırma kabı
ile sunulur.

- A. Acma düğmesi saat yönüne doğru acılır kapama ise bastırıp stop edilir.
- B. Start düğmesi basılarak dijital saat geri sayıma başlar sayım bittiginde kap **A** düğmesine basmadan vakum durmaz vakum bitene kadar bekleyin kabı alın.
- C. Dijital saat gri ok tuşlarından 99.9 saniye kadar ayar yapabilirsiniz 5 saniye bekleme hazır alır karıştırma işlemi bittiginde kırmızı led yanıp söner cihazı kapatıp işinizi bitirin.
- D. Vakum saati 600 mbar altına inmemelidir eğer iniyorsa kompresörden gelen harici hava işyerinde kullanılan hava yetersizdir (önemli) cihazı her ay bosta vakum kabını koymadan çalıştırın eğer saat yükselirse filitre tıkanmıştır asitli su ile 5 dakika içinde bekletin buhar ile temizleyiniz.Yerine takarken dış kaptırmadan takınız.
- E. Filitre sarı malzemeden yapılmıştır revetman artıkları üzerinde sertleşir anahtar kullanarak saat yönün tersine acın krec çözücünde 5 dakika en çok bekletin buharda temizlik yapın saat yönünde yerine takın.
- F. Vakum kabında çözücü ucucu sıvı kullanmayınız kap eriyebilir pompa zarar görebilir filitresiz cihazı kullanmayınız . İş bitiminde bıçak kısmında oringleri temiz tutunuz . Kap olmadan bıçak kısmını cihazda kullanmayınız Bıçak paslanmaz celiktendir sert maddelerle üzerine vurmayınız alçı temizleme sıvıları ile temizlik yapın Karıştırma kabına 3/2 den azla doldurmayın eğer fazla olursa iş bitiminde mutlaka ıslak bezle temizlik yapınız Karıştırma kabını yerine taktığınızda **D.** vakum saati 200 mbar olmadan kabı bırakmayınız eğer filitre **E.** tıkalı ise kap yere düşer. Temizliğine özen gösterin Start düğmesi **B.** ikinci kez basıldığında baştan saymaya başlar. Cihazınızı duvara sağlam oturduğuna dikkat edin vidalar duvarda bir santim kalacak şekilde takın. Cihazı başka amaçlarda kullanmayınız imalatçı firma sorumluluk kabul etmez ilerde kullanılacak ise telefon ile yardım alınız.Cihaz temiz tutulduğu sürece çalışır.